

UK-Tipp 07\_Oktober 2008

## BigMack und Step-by-Step mit Spielsachen kombinieren

BigMack und Step-by-Step sind einfache Sprachausgabegeräte, die durch Drücken auf die große Taste eine aufgenommene Mitteilung zur Gänze oder schrittweise wiedergeben. Der Effekt, dass etwas gesprochen wird, wenn die Taste gedrückt wird, kann noch verstärkt werden, indem ein Spielzeug zusätzlich aktiviert wird!

### Und so funktioniert es:

Im Lieferumfang des BigMack und des Step-by-Steps befindet sich ein Klinkenkabel.



### BigMack:

Das eine Ende des Klinkenkabels stecken Sie in die rechte Buchse auf der Rückseite des BigMack (beschriftet mit „Toy/Application“).



Das andere Ende stecken Sie in die Buchse eines Batterieunterbrechers, der in einem Spielzeug steckt. Der Batterieunterbrecher kann Spielsachen und Geräte, die mit Batterien funktionieren, zu einem UK-tauglichem Spielzeug machen! (siehe UK-Tipp von April und Mai 2008)

Diesmal verwenden wir statt eines Tasters den BigMack.

Wir besprechen den BigMack (z.B. „Elefant, bitte komm her zu mir!“) und verbinden ihn mit der Buchse des Elefanten. Wenn der BigMack nun gedrückt wird, setzt sich der Elefant in Bewegung – aber nur solange die Aufnahme läuft! Dann muss wieder gedrückt werden. Die sprachliche Aufforderung („komm her!“), die dann auch gleich erfüllt wird, kann einem Kind noch einmal deutlicher machen, wie effektiv Sprache ist! Um ein Gerät wie ein *Spielzeugradio* für eine kurze Zeit mit dem BigMack zu aktivieren, ist eine gleichzeitig abgespielte Aufnahme störend. Drücken Sie deshalb bei der Aufnahme nur die Taste, solange Sie wollen, ohne zu sprechen.



Ähnlich lässt sich auch der **Step-by-Step** mit einem Spielzeug aufpäppeln. Beim Step-by-Step kann man mehrere Aussagen hintereinander aufnehmen und abspielen. Man kann nun 1 von diesen Aussagen wählen, währenddessen für die Länge der Aussage ein Gerät aktiviert wird. Dazu muss während der Aufnahme dieser Aussage der Aufnahmeknopf 1 x kurz gedrückt werden.

### Beispiel:

*Der Step-by-Step wird mit einem kleinen Spielzeugventilator verbunden.*

*Folgende Aussagen werden aufgenommen:*

*„Mir ist so heiß!“*

*„Ist dir auch heiß?“*

*„Ich mache uns Wind!“ (während der Aufnahme dieses Satzes den Aufnahmeknopf drücken – beim Abspielen wird der Ventilator gestartet).*